



N2-1302-V7

Date de dernière diffusion : 14/11/2023

Laboratoire - pré-analytique : gestion des tubes et milieux spécifiques

1. OBJECTIFS

Certaines analyses nécessitent d'être réalisées sur milieu spécifique. Ces milieux sont fournis par les laboratoires spécialisés qui réalisent ces analyses ou par des fournisseurs spécifiques. Ce mode opératoire présente l'ensemble des milieux spécifiques utilisés par le laboratoire, leurs fournisseurs et leurs usages attendus.

2. PERSONNES CONCERNEES

Secrétaires du laboratoire habilitées au poste des envois.

Préleveurs (IDE, sages-femmes, médecins, internes...) dans les services de soins et au laboratoire.

3. UTILISATION DES MILIEUX SPECIFIQUES

Pour les examens nécessitant un milieu spécifique (voir annuaire des examens), le préleveur appelle le secrétariat du laboratoire (poste 6497) afin de venir chercher le matériel nécessaire au laboratoire.

La secrétaire prépare le milieu spécifique et les documents associés si nécessaire.

Le préleveur se déplace au laboratoire pour récupérer le milieu spécifique.

Voir page 2 : Liste des milieux spécifiques utilisés – usages et fournisseurs.

4. GESTION DES STOCKS DE MILIEUX SPECIFIQUES AU LABORATOIRE

Les distributions de la semaine sont comptabilisées sur un tableau à côté du réfrigérateur RS.

Les secrétaires vérifient la mise à jour du stock de tubes, la date de péremption et l'intégrité des tubes une fois par semaine.

Les secrétaires gèrent et tiennent à jour une fiche de stock ([N3-983](#)) présente sur le réfrigérateur RS afin d'éviter une rupture de stock des tubes.

5. COMMANDE DE MATERIEL

MILIEUX FOURNIS PAR LES CHU (Reims et Amiens) :

Service d'hématologie du CHU d'Amiens : 03 22 08 70 00

Service de biochimie du CHU d'Amiens : 03 26 78 32 81 ou 03 26 78 31 97

Livraison des milieux : soit les coursiers du service logistique du CHICN se déplacent, soit les milieux sont acheminés par le coursier externe avec les examens externalisés.

AUTRES FOURNISSEURS :

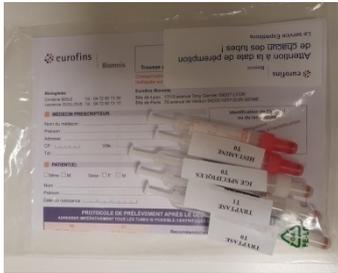
BECTON DICKINSON commande faite par Armure via diagdirect

CML LABELLIANS commande faite par Armure via diagdirect

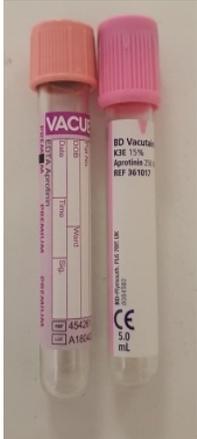
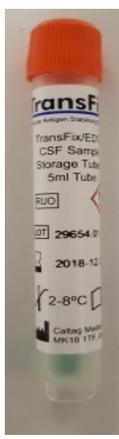
ROCHE commande faite par téléphone : 04.76.76.30.37

Les tubes sont livrés par le transporteur de la société (BECTON DICKINSON, CML LABELIANS, ROCHE).

Liste des milieux spécifiques utilisés (usages et fournisseurs)

Envois extérieurs (température ambiante au-dessus du frigo RS)		
Fournisseur : ROCHE	Fournisseur : BIOMNIS	Fournisseur : BIOMNIS
Tube STREK (blanc) Cell-Free DNA 8.5 ml Réf. 07785666001	Kits Anaphylactiques : - 2 tubes EDTA (rose) 2.7 ml - 3 tubes secs (blanc) 4.9 ml - bon spécifique	Kits DPNI : - Tube STREK Cell-Free DNA (camouflage) - tube de protection pour transport - bon spécifique
		
« BIOPSIE LIQUIDE » T790m	PROTOCOLE CHOC ANAPHYLACTIQUE : Histamine, Tryptase IgE spécifiques	DPNI : Diagnostic prénatal non invasif Trisomies 13-18-21 ADN foetal dans le sang maternel

Envois extérieurs (Frigo RS03)	TUBES PCR POUR BD MAX		
Fournisseur : CERBA	Fournisseur : CML LABELIANS	Fournisseur : BIOMNIS	Fournisseur : BECTON DICKINSON
Milieu de transport rose (bouchon bleu)	ESWAB rose : Ecouvillon + Milieu liquide Amies	KIT K1 PCR VIRUS DIVERS	BDMax UVE Specimen Collection Kit : Pipette +écouvillon + milieu de transport Réf. 443925
			
CULTURE DE TROPHOBLASTES	HERPES VIRUS	COQUELUCHE : Bordetella pertusis et paraptusis	CHLAM/GONO : C.trachomatis et N.gonorrhoeae (Homme/Femme)

Envois extérieurs (Frigo RS)						
Fournisseur : Becton dickinson	Fournisseur : BIOMNIS	Fournisseur : CHU de REIMS	Fournisseur : BIOMNIS	Fournisseur : BIOMNIS	Fournisseur : CHU AMIENS	Fournisseur : BIOMNIS
<p>Tube ACD (jaune) solution B BD Vacutainer 6 ml Réf 367756</p>	<p>Tubes APROTININE + EDTA - Vacuette 4mL EDTA aprotinine (rose orangé) Réf 454261 <u>ou</u> - BD vacutainer 5 ml K3E aprotinine (rose) Ref 8084980</p>	<p>Tube spécifique bouchon blanc pour LCR 3 mL</p>	<p>KIT K1 PCR VIRUS DIVERS</p>	<p>KIT K14 OU K11</p>	<p>Tubes TRANSFIX / EDTA pour LCR 5 ml</p>	<p>Balai endocervical + flacon THINPREP PAP TEST 20 mL + bon de demande et protocole pvt Réf 70097-003</p>
						
<p>IMMUNO- PHENOTYPAGE LYMPHOCYTAIRE (facultatif – faisable sur EDTA)</p>	<p>ACTH PTH RP</p>	<p>Protéines TAU, Marqueurs de neuro- dégénérescences dans le LCR</p>	<p>PCR VIRUS Divers (Sauf Herpes) + MYCOPLASMES UROGENITAUX : Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum</p>	<p>Mycoplasma genitalium</p>	<p>IMMUNO- PHENOTYPAGE lymphocytaire sur LCR</p>	<p>HPV : Papillomavirus</p>

NB : Certains milieux de transports utilisés très exceptionnellement pour analyses externalisées peuvent ne pas être listés dans ce document. Dans ce cas, se référer au manuel de prélèvement du laboratoire sous-traitant concerné.