



PMOT - Demande pour le laboratoire - prélèvements de cornées - prélèvement sanguin

N3-749 - V8

Date de dernière diffusion : 24/07/2023

Partie réservée au service

Étiquette patient

Nom du préleveur :

Nom du prescripteur :

Date du prélèvement :/...../.....

Heure :

PMOT - sérothèque PMOT : **tubes du kit avec gel séparateur**

Procédure dégradée : PMOT - sérothèque PMOT : sur sérothèque du laboratoire ou sur tubes secs sans gel, en cas d'absence de tubes avec gel séparateur

Mettre ce bon dans la pochette contenant les tubes de prélèvement

Partie réservée au laboratoire

Nom du technicien ayant pris en charge la centrifugation :

Date :/...../.....

Heure de la centrifugation :

Opération à réaliser :

1. Saisir le dossier avec l'identité : UF 7461 ; éléments PMO
2. Coller une étiquette Glims sur ce bon et vérifier que la partie ci-dessus est correctement renseignée
3. Tube **avec** gel séparateur : ne pas coller d'étiquette Glims sur le tube de prélèvement.
Tube **sans** gel séparateur : coller l'étiquette Glims sur le tube de prélèvement et sur le tube décanté. Ne sont décantés que les tubes sans gel séparateur.
4. Vérifier **que l'identité du patient est bien renseignée sur le prélèvement**
Centrifuger les tubes à **4500 tours par minute pendant 20 mn ou pendant 15 mn 1500g minimum**,
15° < T° < 18°C, il faut utiliser les centrifugeuses
« Mégafuge ST Plus » → référence **2021/70800** ou référence **2021/67500**
Lorsque les tubes sont centrifugés, les stocker dans le réfrigérateur RB13 de la biochimie
5. Ce bon est archivé avec les demandes d'examen du jour et peut-être accessible aux infirmières de coordination PMOT (joignables au 65.06)